

## Zestaw Parafiniarka WAX2000 Instrukcja obsługi



### Dane techniczne:

Moc: 300W

Zasilanie: 300W

napięcie wejściowe: 220/230V

napięcie wyjściowe: 220/230V

Zakres temperatur: 55-75°C

Pojemność: 4500ml

Model: WAX2000

Nr certyfikatu: POCE200529053SCE, POCE200603041ACS.

### Właściwości zabiegu parafinowego:

- Zabiegi parafinowe czynią skórę gładką i miękką; działanie najlepiej widać na suchej, starzejącej się oraz zniszczonej czynnikami atmosferycznymi skórze.
- Dzięki łatwości wykonania i skuteczności, zabiegi parafinowe są popularne w salonach piękności na całym świecie.
- Inaczej niż w przypadku innych zabiegów, zabieg parafinowy przynosi natychmiastowe efekty w postaci gładkiej i dobrze nawilżonej skóry, gdy tylko ta zostanie zanurzona w gorącej parafinie.
- Zabiegi parafinowe pomagają polepszyć krążenie krwi oraz pobudzić metabolizm skóry.
- Zabiegi parafinowe pomagają eliminować martwe komórki naskórka, nawilżyć i wygładzić szorstką i suchą skórę, rozluźniając ją, niosąc ukojenie oraz pomagają w walce z zapaleniami.

### Instrukcja obsługi urządzenia i wykonania zabiegu parafinowego:

1. Oczyścić dokładnie skórę w miejscach, które będą poddawane zabiegowi.
2. Urządzenie postawić na stabilnym podłożu. Umieścić w komorze podgrzewacza pożądaną porcję parafiny - należy pokruszyć ją na mniejsze kawałki. Poziom rozpuszczonej parafiny nie może przekroczyć poziomu „MAX” i nie może być niższy, niż poziom „MIN”.
3. Przykryć zbiornik pokrywką - ochroni ona parafinę przed pyłem, a także pomoże podtrzymać temperaturę wewnątrz podgrzewacza.
4. Podłączyć urządzenie do zasilania, a następnie ustawić włącznik na pozycję „HI”. Kontrolka zasilania włączy się, a parafina będzie podgrzewana.
5. Zwykle topienie parafiny trwa około 30 minut (czas ten zależy od ilości parafiny w zbiorniku podgrzewacza). Urządzenie automatycznie przerwie podgrzewanie po osiągnięciu maksymalnej temperatury.
6. W czasie, kiedy parafina jest roztopiona, należy ustawić przycisk na pozycję „LO”, aby utrzymać ciepło parafiny.
7. Należy odczekać, aż parafina nieco ostygnie. Przed zanurzeniem skóry w parafinie należy sprawdzić jej temperaturę (np. na nadgarstku), aby uniknąć ewentualnego dyskomfortu lub oparzenia.
8. Parafinę należy nakładać na skórę pędzelkiem, zgodnie z kierunkiem wyrastania włosów. Założyć foliową, a następnie bawełnianą rękawicę/skarpetę. Dzięki wysokiej temperaturze odżywcze składniki zawarte w parafinie łatwiej wnikają w skórę. Skóra zostaje ogrzana, co stymuluje krążenie krwi, zwiększa dotlenienie komórek oraz je stymuluje.
9. Po zabiegu należy wyłączyć urządzenie, a następnie odpiąć je z zasilania.
10. Pozostała parafina nadaje się do ponownego użytku, gdy tylko wystygnie i zmieni stan skupienia na stały.

### Ostrzeżenia:

- Nie wolno dotykać bezpośrednio elementów grzewczych bądź zbiornika
- Nie wolno nagrzewać pustego zbiornika
- Należy wpiąć urządzenie do sieci zgodnej ze specyfikacją urządzenia.
- Nie wolno odpiąć urządzenia z sieci, kiedy urządzenie jest włączone i pracuje.
- Należy zaprzestać użytkowania urządzenia, jeśli zauważysz jakikolwiek nietypowy ruch lub hałas.
- Przechowywać i używać w suchych pomieszczeniach. Trzymać z dala od wody, wilgoci. W innym wypadku urządzenie może przestać działać i/ lub ulec uszkodzeniu.
- Po skończeniu użytkowania urządzenia należy wypiąć je z sieci zasilającej.
- Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić na nowy tego samego typu w zakładzie serwisowym.
- Dokonywanie samodzielnych przełączeń i zmian w urządzeniu jest zabronione.
- Otwieranie aparatu jest kategoriycznie zabronione i równoważne z utratą gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.
- Trzymać z dala od dzieci.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych

### IMPORTER

Michał Szewczyk, Piotr Malinowski s.c  
Ul. Piotrkowska 270  
90-361 Łódź, Polska  
allehurt.com

Made in P.R.C.

**Karta Gwarancyjna nr**.....  
Model..... Parametry.....  
Cena..... Data sprzedaży.....

**Warunki gwarancji:**

1. Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy jest posiadanie karty gwarancyjnej.
2. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, parametrów oraz wypełnionych pól adresowych klienta jest nieważna.
3. Gwarancji udziela się na okres dwunastu miesięcy od daty sprzedaży.
4. Ujawnione w tym okresie wady będą usunięte bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 28 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia na koszt klienta i odesłania sprawnego na koszt gwaranta.
5. Gwarancja nie obejmuje:
  - uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub konserwacji urządzenia
  - uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz wszystkich innych spowodowanych działaniem celowym lub zaniedbaniem użytkownika oraz z powodu działania siły zewnętrznej
  - żarówek UV do urządzenia
6. Gwarancja ważna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej.
7. Reklamujący ma obowiązek dostarczyć sprzęt do sprzedającego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym na swój koszt. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
8. Utrata gwarancji:
  - w przypadku samowolnych dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw
  - w przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania
  - w przypadku samowolnego dokonywania przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
9. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy tylko w przypadku, gdy stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia oraz w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność 3 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
- zwrot gotówki tylko po dostarczeniu dokumentu zakupu
10. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego i w przypadku innego użytkownika traci gwarancję.
11. Klient zobowiązany jest do opisanie usterki i występujących wad oraz załączenia sporządzonego opisu do karty gwarancyjnej.

Podpis klienta.....

Data zgłoszenia do naprawy	Data wykonania naprawy	Szczegóły naprawy	Podpis pracownika

**Dane klienta:**

Imię i nazwisko.....

Adres.....

Telefon.....

Towary reklamowane należy odesłać na adres:

**Allepaznokcie**, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź,

Tel. serwisowy: **516 140 007**

Pieczętka firmowa

data i podpis sprzedawcy